

## VISをネットワークでご使用になるには以下の設定が必要です

### 1、VIS一式のインストール

- ・インストールガイド通りにインストールを行い、デスクトップ上に作られたVISのアイコンは削除してください。
- ・また、「スタート」-「すべてのプログラム」の中に作られたVISのショートカットも削除してください。
- ※現時点でVISは絶対に起動しないでください

### 2、親機にてVISのインストールフォルダを共有する

- ・インストールフォルダ(通常はC:¥ATP¥Visual...)を共有してください。

### 3、親機にてネットワークドライブを割り当てる

- ・②で共有したフォルダをVドライブに割り当ててください。

### 4、子機にてネットワークドライブを割り当てる

- ・②で共有した親機の共有フォルダを“Vドライブ”に割り当ててください。

### 5、VISのショートカットを作成

- ・各パソコンの“Vドライブ”にあるVIS.exeのショートカットを作成しデスクトップに配置します。

### 6、動作確認

- ・親機、子機での動画・静止画キャプチャ、患者情報などが問題なく保存・登録ができるか？
- ・そのデータが全VISで共有できているか？

